

Verwendungszweck

Zur Gewinnung von Nukleinsäuren aus Speichelproben.

Inhalt

Trichter, Stabilisierungspuffer, vorgefülltes Röhrchen, Deckel.



Anwendung

30 Minuten vor der Anwendung nicht essen, trinken, rauchen, Zähne putzen oder Kaugummi kauen.

Prüfen Sie vor dem Öffnen, ob der Flüssigkeitsstand 2 ml beträgt. Wenn die Lösungen vor Gebrauch trüb erscheinen, erwärmen Sie das Röhrchen zwischen den Händen, bis die Lösung klar wird.

- Entfernen Sie den Deckel von dem Röhrchen. Bewahren Sie den Deckel zum späteren Verschliessen auf. Schrauben Sie den Sammeltrichter auf das Röhrchen.
- Spucken Sie in den Trichter, bis der Flüssigkeitsstand im Röhrchen ohne Blasen die 4-ml-Linie erreicht. Das Sammeln von Speichel dauert zwischen 2 und 5 Minuten.
- Schrauben Sie den Sammeltrichter ab und setzen Sie den Deckel fest auf. Entsorgen Sie den Trichter.
- Schütteln Sie das Sammelröhrchen mehrmals, um den Speichel mit der Lösung zu vermischen.



Vorsichtsmassnahmen

Flüssigkeit nicht verschlucken. Wenn die Stabilisierungsflüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, gründlich mit Wasser spülen. Der Deckel kann eine Erstickungsgefahr für kleine Kinder darstellen.

Sicherheitsdatenblätter erhältlich unter www.isohelex.com