

Benötigtes Material und Volumen

- Peripheres venöses Blut
- Fetale Rhesus-D-Bestimmung: 10 ml (ohne Gel)

Probengefäss



Vorbereitung

- Keine spezielle Vorbereitung der Patientin notwendig
- Vorgängig Durchführung einer genetischen Beratung gemäss Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG)
- Ausfüllen und Unterschreiben des Auftragsformulars durch die auftraggebende Ärztin / den auftraggebenden Arzt und die Patientin, inkl. der Erklärung zur Kostenübernahme sowie der vollständigen Angaben zur Indikation und zur Klinik

Vorgehen zur Entnahme

- Entnahmeröhrchen mit vollständigem Namen und Geburtsdatum der Patientin beschriften (optimal mit Aufkleber)
- Venöses Blut in steriles EDTA-Röhrchen entnehmen
- Sofort durch mehrmaliges Kippen gut durchmischen
Nicht zentrifugieren!
- Lagerung und Transport bei Raumtemperatur
(Proben nicht kühlen oder einfrieren)

Versand

- Keine telefonische Voranmeldung der Untersuchung notwendig (ausser bei klinisch dringenden Fällen)
- Proben sicher verpacken:
 - Wasserdichtes Primärgefäss (möglichst Entnahmeröhrchen)
 - Wasserdichtes Sekundärgefäss mit ausreichender Menge an absorbierendem Material (zum Schutz der Aussenverpackung bei eventuellem Austritt von Probenflüssigkeit)
 - Aussenverpackung der Norm P650 versehen mit UN3373-Kennzeichnung
- Untersuchungsmaterial zusammen mit dem Auftragsformular sofort per A-Post versenden, sodass die Probe innerhalb von 48 Stunden nach Blutentnahme bei uns im Labor eintrifft.